

F35

COMBINATIE-OVERZICHT



MERK & MODEL	BEVESTIGINGSKLEM	MERK & MODEL	BEVESTIGINGSKLEM
BREEZY Basix ²	D	RGK Octane	G
BREEZY Parix ²	D	RGK Octane Sub4	G
BREEZY Rubix ²	D	RGK Tiga	A
BREEZY Unix ²	D	RGK Tiga F2	A
QUICKIE Argon ²	A	RGK Tiga FX	A
QUICKIE Easy 200	A	RGK Tiga Sub4	A
QUICKIE EasyMax	A		
QUICKIE EasyMax SA	A		
QUICKIE Helix ²	D		
QUICKIE Helium	B		
QUICKIE Life	A		
QUICKIE Life R	A		
QUICKIE Life T	A		
QUICKIE Life RT	A		
QUICKIE Neon ²	A		
QUICKIE Nitrum	B		
QUICKIE Nitrum Hybrid	B		
QUICKIE QS5 X	A		
QUICKIE Xenon ²	B		
QUICKIE Xenon ² Hybrid	B		
QUICKIE Xenon ² SA	D		

Opmerking: Bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de F35 gemonteerd kan worden. Echter de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte zijn van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 35 mm nodig voor het bevestigen van de klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het combinatie-overzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant. Op de volgende pagina staat informatie m.b.t. het aankoppelen. Zie prijslijst voor de no-go's met de rolstoelen van Sunrise Medical.

F35

BEVESTIGINGSKLEMMEN

De F35 past op de meest voorkomende handbewogen rolstoelen met de volgende specificaties:

FRAMETYPE (BOX, OPEN, VAST VOORFRAME OF WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN)

- » Ronde framebuizen met een diameter van 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm en 30 mm.
- » Ovale framebuizen (Xenon², Helium en Nitrum).

Daarnaast zijn er montageklemmen beschikbaar voor speciale framevormen, zie het combinatie-overzicht en de prijslijst voor de mogelijkheden.



VERSIE A (EMD010029)
 Geschikt voor ronde framebuizen met een diameter van 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm en 30 mm. Aanpasbaar d.m.v. meegeleverde verloopstukken.



VERSIE B (EMD010030)
 Ovalen framebuizen voor de Nitrum, Xenon² en Xenon² Hybrid.



VERSIE D (EMD010031)
 Geschikt voor Xenon² SA.



VERSIE G (EMD010062)
 Geschikt voor ronde framebuizen met een diameter van 32 mm.

POSITIE MONTAGE

De optimale hoek van de F35 tot aan de vloer is 80°. Voor uitstekende prestaties raden we aan niet onder de volgende minimale montagehoogtes van 260 tot 480 mm te komen (gemeten van vloer tot onderkant klem).


FRAMEBREEDTE

Meet de breedte tussen het voorframe van de rolstoel (midden buis tot midden buis).

- » Bij een inset moet de montagepositie van de klemmen onder de bocht zijn.
- » Door de meetmethode of de framevariant (inset, V-inkeping, ab- of adductie etc) kan de gemeten breedte afwijken van de zitbreedte.
- » Gebruik alleen de gemeten afmeting en niet de zitbreedte om de compatibiliteit te controleren.
- » Montagebereik van 260 tot 480 mm.

NO-GO CHECKER

(PAPIERENMAL)

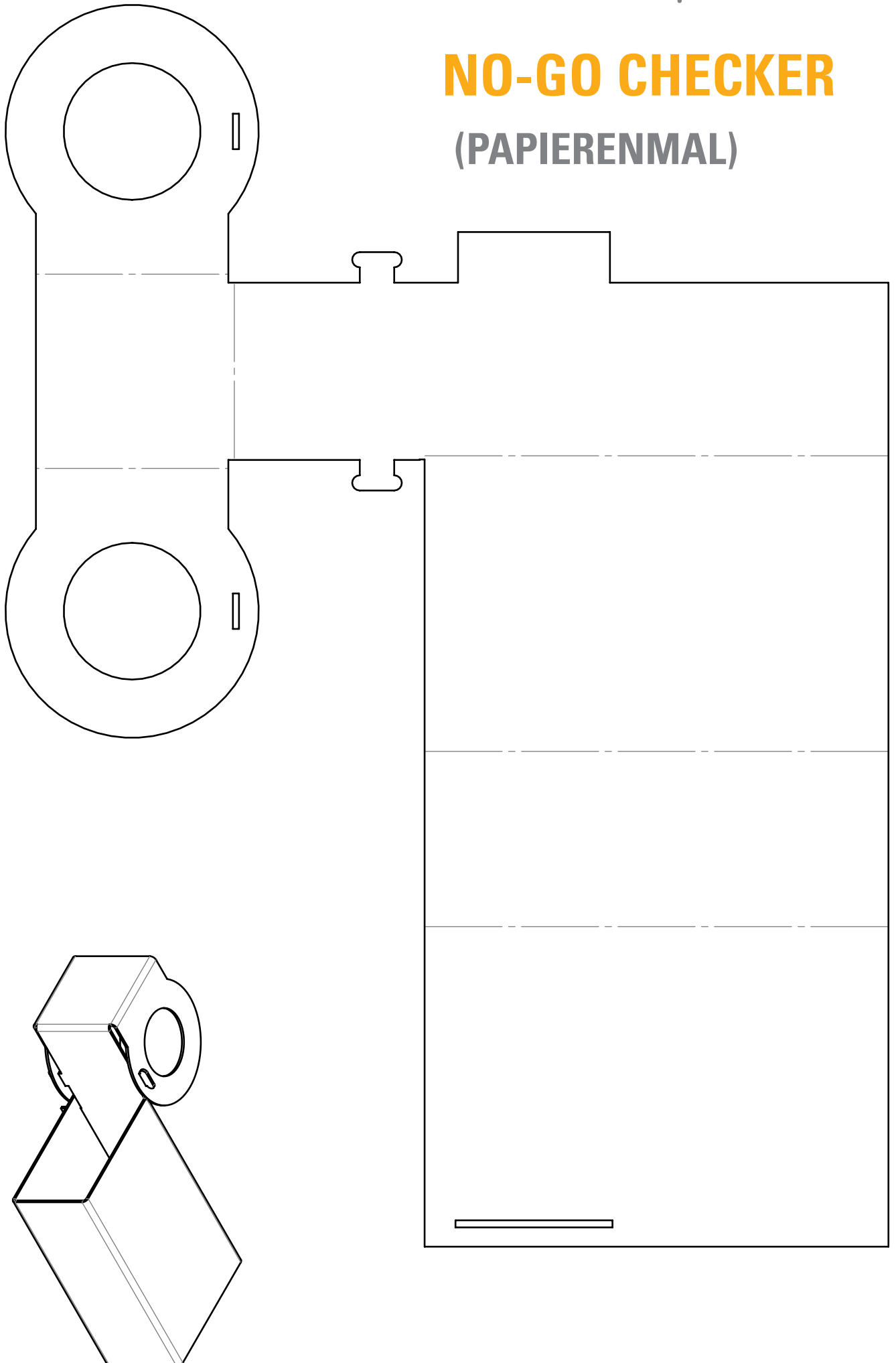


NO-GO CHECKER

SUNRISE MEDICAL ROLSTOELEN

Alle no-go's zijn gebaseerd op 24" wielen.


QUICKIE ARGON² DOCKING A

Zitdiepte

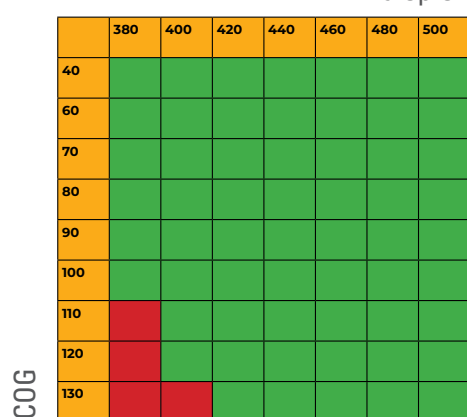


QUICKIE LIFE FF DOCKING A

Zitdiepte

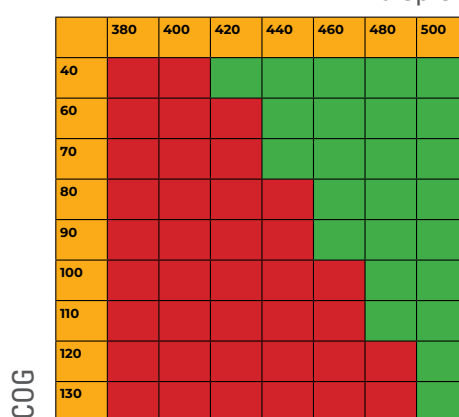


QUICKIE LIFE SA DOCKING A

Zitdiepte

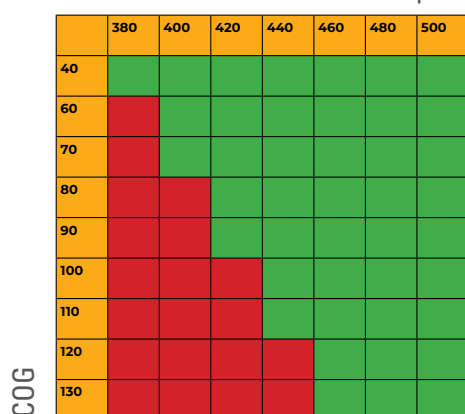


QUICKIE LIFE R FF DOCKING A

Zitdiepte

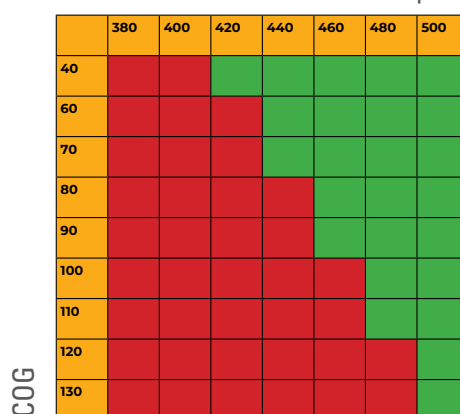


QUICKIE LIFE R SA DOCKING A

Zitdiepte

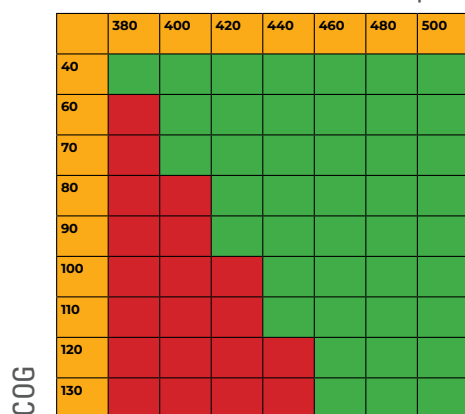

QUICKIE NEON² DOCKING A

Zitdiepte

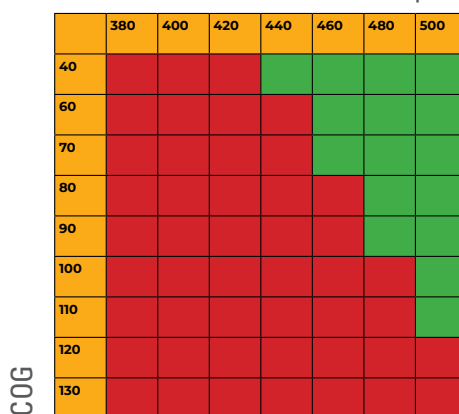

NO-GO CHECKER

SUNRISE MEDICAL ROLSTOELEN

Alle no-go's zijn gebaseerd op 24" wielen.


QUICKIE NITRUM & NITRUM HYBRID DOCKING B

Zitdiepte




QUICKIE XENON² DOCKING B

Zitdiepte

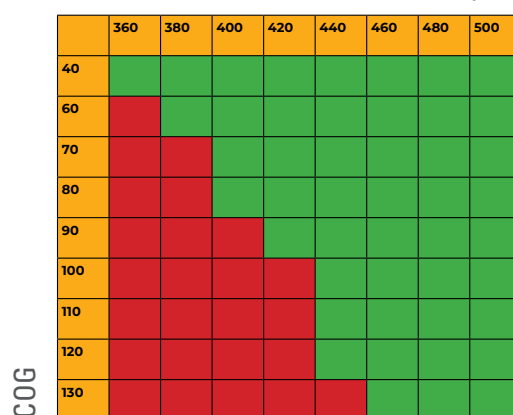

QUICKIE XENON² HYBRID DOCKING B

Zitdiepte

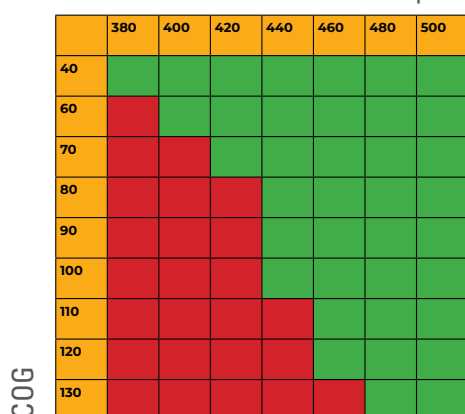


QUICKIE XENON² SA DOCKING D

Zitdiepte



QUICKIE QS5X DOCKING A

Zitdiepte

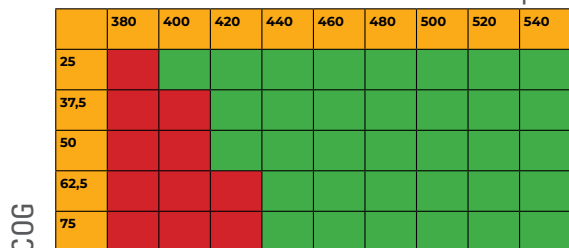

24" wielen

QUICKIE QS5X DOCKING A

Zitdiepte



25" wielen