

E | F35

PŘIPOJENÍ K VOZÍKU KROK ZA KROKEM

- Před dokováním (připojením) k vozíku se vždy ujistěte, že je pohon vypnutý.
- Vždy zabrzděte invalidní vozík.
- Před použitím se ujistěte, že je invalidní vozík plně spojen s přídatným pohonem.
- Stejně jako u všech pohyblivých částí hrozí nebezpečí zachycení prstů a/nebo oděvu.
- Při ovládání dokovacích svorek buďte obzvláště opatrní.



1

Vložte pomocný rám do dokovacích svorek.



2

Nyní otáčejte upevňovací šrouby ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete pevného a bezpečného uchycení pomocného rámu ve svorkách.



3

Uchopte přídatný pohon a zasuněte dokovací kolík do středové konzoly pomocného rámu.

4

Zatlačte řídítka dopředu - směrem nahoru, dokud zajišťovací šroub automaticky nezapadne na místo. Brzdy invalidního vozíku uvolněte až po zajištění pohonu na místě.




Naskenujte kód QR s návodem, jak připevnit F35 na invalidní vozík

E | F35

ODPOJENÍ OD VOZÍKU KROK ZA KROKEM

- Před odpojením pohonu od vozíku se vždy ujistěte, že je pohon vypnutý.
- Vždy zabrzděte invalidní vozík.
- Před použitím se ujistěte, že je invalidní vozík plně spojen s přídavným pohonem.
- Stejně jako u všech pohyblivých částí hrozí nebezpečí zachycení prstů a/nebo oděvu.
- Při ovládání dokovacích svorek buďte obzvláště opatrní.

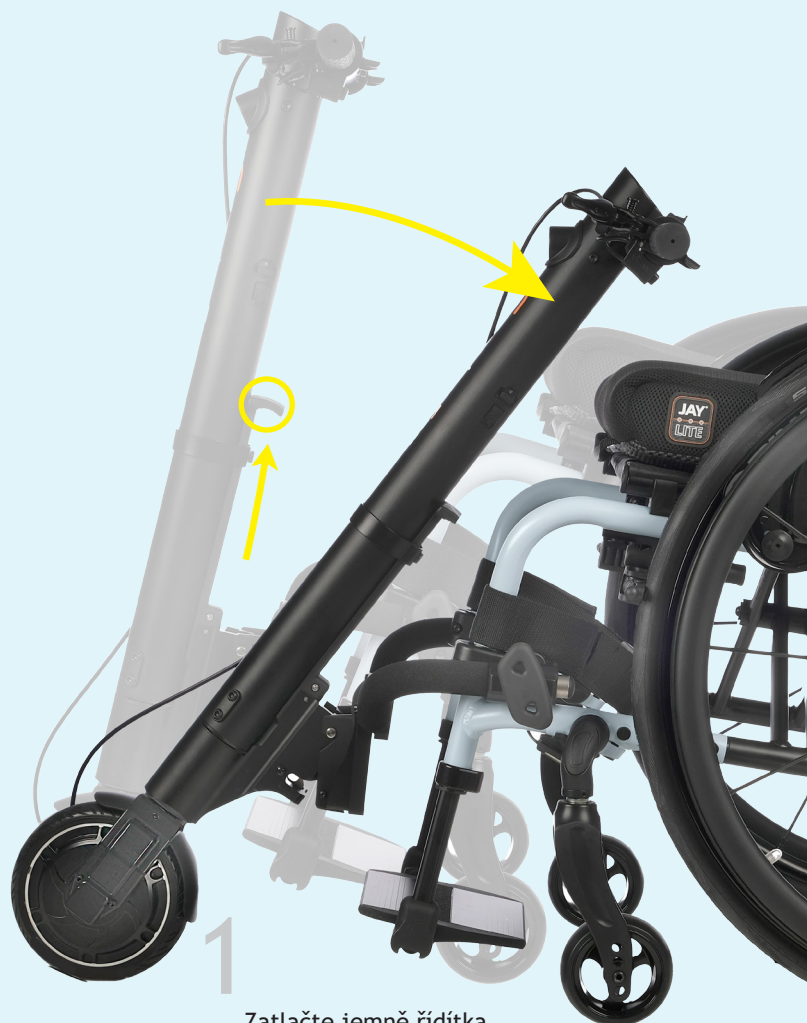

1
Zatlačte jemně řídítka směrem od sebe a zatáhněte za uvolňovací páčku na rámu pohonu a podržte ji. Nyní jemně povolte tlak na řídítka.



2
Nyní pomalu spouštějte přídavný pohon, dokud se kolečka vozíku nedotknou podlahy.

Chcete-li vyjmout F35 pouze z pomocného rámu, lze kroky 1 a 2 provést nezávisle na krocích 3 a 4.



3
Uvolněte šrouby upínacích svorek na obou stranách a vytáhněte pomocný rám, dokud nebudou trubky pomocného rámu zcela vytaženy ze svorek.



4
Vyjměte pomocný rám z dokovacích svorek.



Naskenujte kód QR pro zobrazení servisních videí.