



Kinetic Balance Skridtsele, Neopren

Art.nr.

Størrelse

7.70002.0	XS
7.70002.1	S
7.70002.2	M
7.70002.3	L
7.70002.4	XL

Kinetic Balance

Skridtsele Neopren

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Skridtsele, Neopren
7.70002.x

Indhold

2 rørklemmer
3 Spændeholdere
3 Kamspænder
3 bæltespænder
1 skridtsele
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter.
Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Lad brugeren sidde i sædedelen af stolen.
6. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetre eller brugerens mave ind.
7. Tjek regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk