



Kinetic Balance H-Sele, Flex Control
Art.nr. Størrelse

5.81001.1	S
5.81001.2	M
5.81001.3	L
5.81001.4	XL

Kinetic Balance

H-Sele Flex-Control

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB H-Sele, Flex Control
5.81001

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 brystsele
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid sternumselen sammen med en hoftesele! Åben altid selen før du åbner hofteselen.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Juster klemmernes position. Tilpas afstanden mellem de øverste bæltter, så de krydser midt på skuldrene uden at røre ved nakken.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastspændingspunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Juster placeringen af de øverste stropper, så polstringen hviler mod skuldrene. Brug den fleksible kontrol til at justere elasticiteten i de øverste seler. Hvis der er en vis elasticitet, skal du trække i enden af stroppen for at gøre den længere. Hvis der er mere elasticitet, skal du trække i den orange løkke for at gøre enden af selen kortere.
6. Juster de nederste stropper.
7. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
8. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
9. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.
10. Når selen er i brug, kan H-locatoren åbnes og lukkes med de øvre sideudlødere på produktet. Den midterste fastspændingsanordning kan bruges til at justere afstanden mellem de to polstrede dele, og den kan åbnes og lukkes med sideudløseren.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk