



Sternumsele, Dame

Art.nr.

Størrelse

5.71014.1

S

5.71014.2

M

# Kinetic Balance

## Sternumsele Dame

BRUGERVEJLEDNING



**KINETIC BALANCE**

## Produkt

KB Sternumsele, Dame  
# 5.71014.0

## Indhold

4 rørklemmer  
4 stropholdere  
4 klemmespænder  
4 bæltespænder  
1 brystsele  
1 brugervejledning

## Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

## Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid sternumselen sammen med en hoftesele! Åben altid selen før du åbner hofteselen.

## Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

## Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Juster klemmernes position. Tilpas afstanden mellem de øverste bæltter, så de krydser midt på skuldrene uden at berøre nakken.  
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastspændingspunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.  
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Juster placeringen af de øverste stropper, så polstringen hviler mod skuldrene.
6. Juster de nederste stropper.
7. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
8. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
9. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.
10. Under brug kan selen åbnes og fastgøres ved hjælp af spænderne med sideudløser på produktet.

## Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
T: 70 22 43 49  
E: info@sunrisemedical.dk  
[www.sunrisemedical.dk](http://www.sunrisemedical.dk)

## Produkt

KB Sternumsele Dame  
# 5.71014

## Innhold

4 rørklemmer  
4 båndholdere  
4 klemspenner  
4 beltespenner  
1 brystvest  
1 bruksanvisning

## Bruk

Sele for bekkenposisjonering.

Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

## Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

## Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

## Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.  
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.  
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.

## Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 VESTBY  
T: 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)