



Sternumsele med lynlås

Art.nr. Størrelse

Z5.71022.1 S

Z5.71022.2 M

Kinetic Balance

Sternumsele med lynlås

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Sternumsele med lynlås
Z5.71022.

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 brystsele
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid sternumselen sammen med en hoftese! Åben altid selen før du åbner hofteselen.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Sørg for, at lynlåsen i midten af vesten er helt lukket, før du sætter den på. Juster positionen af klemmespænderne. Tilpas afstanden mellem de øverste stropper, så de krydses midt på skuldrene uden at røre nakken.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastgørelsespunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør rørklemmen til røret samtidig med klemmespændet.
5. Juster placeringen af de øverste stropper, så polstringen hviler mod skuldrene.
6. Juster de nederste stropper.
7. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
8. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
9. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.
10. Når selen er i brug kan selen åbnes og lukkes ved brug af spænderne med sideudløsning. Lynlåsen på midten af selen kan bruges til at åbne og lukke den. Inden du åbner lynlåsen, skal du kontrollere at der ikke er for meget tryk på selen eller stropperne.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk