

**Kinetic Balance Brystsele Neopren**

| Art.nr. | Størrelse |
|---------|-----------|
| 4020    | XS        |
| 4021    | S         |
| 4022    | M         |
| 4023    | L         |



# Kinetic Balance

## Brystsele Neopren

BRUGERVEJLEDNING



**KINETIC BALANCE**

## Produkt

KB Brystsele, Neopren #  
4020, 4021, 4022, 4023

## Indhold

2 rørklemmer  
2 stropholdere  
2 klemmespænder  
2 bæltespænder  
1 brystsele  
1 brugervejledning

## Brug

Sele til brystpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

## Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid sternumselen sammen med en hoftese! Åben altid selen før du åbner hofteselen.

## Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

## Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
5. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.

## Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
T: 70 22 43 49  
E: [info@sunrisemedical.dk](mailto:info@sunrisemedical.dk)  
[www.sunrisemedical.dk](http://www.sunrisemedical.dk)