



Kinetic Balance Brystsele

Art.nr. Størrelse

4001	S
4003	L

Kinetic Balance

Brystsele

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Brystsele
4001, 4003

Indhold

2 rørklemmer
2 stropholdere
2 klemmespænder
2 bæltespænder
1 brystsele
1 brugervejledning

Brug

Sele til brystpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport. Brug altid brystselen sammen med en hoftesele! Åben altid brystselen før du åbner hofteselen.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledninger

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetetre eller brugerens mave ind.
5. Sørg for, at eventuelle stropper ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
6. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele samt at stropperne er korrekt fastgjort og strammet.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk