

Rollatorholder til frontsammenklappelig rollator Sterling Elite² Plus

Varetekst		Varenummer
Rollatorholder	☐	INOS120171
Beslag til Elite ² Plus rollatorholder	☐	INOR054003



MONTERINGSVEJLEDNING

Afmonter eksisterende skruer, der holder anti-tip-hjulet og bagkofangeren (Fig 1).



Fig. 1

Monter de to beslag til rollatorholderen (Fig 2).



Fig. 2

Brug de eksisterende skruer, men fjern skiven på den nederste skrue, så skruens længde er tilstrækkelig (Fig 3).

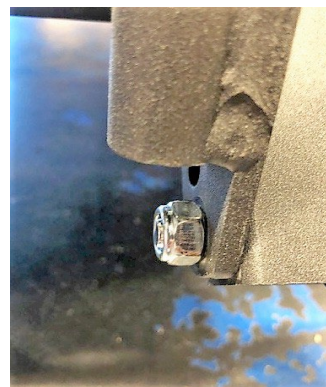


Fig. 3

De to bagerste huller på skrå bruges til montering (Fig 4).



Fig. 3

Juster rollatorholderen med dens justeringsskruer, der bruges til breddejustering, og placer rollatorholderen oven på beslagene og spænd den med låseskruen (Fig 5 og 6).

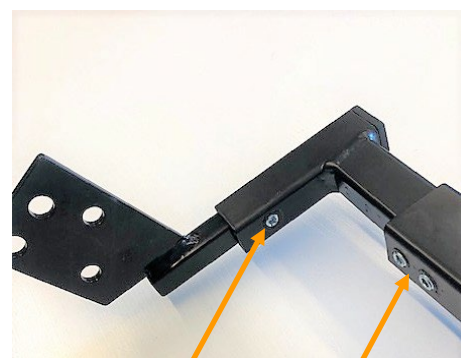


Fig. 5

Låseskrue

Sæt skruer til
breddejustering



Fig. 6



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Danmark

T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk