

MONTERINGSVEJLEDNING

Elite Mini stokkeholder, Sædemonteret



Beskrivelse

Elite Mini stokkeholder


Varenummer

A1666SU

MONTERINGSVEJLEDNING - Sterling Elite2 stokkeholder, Sædemonteret



1. Løsn de 2 stk. 5 mm unbraco skruer på armlænet og afmonter armlænet.

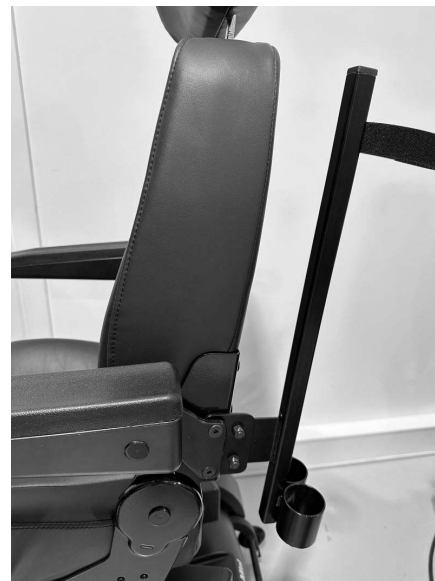

2. Stokkeholderen sættes mod scooterens ryg hvorefter armlænet monteres udenpå stokkeholderens beslag så stokkeholderen og armlæn fastgøres sammen.
Skrueerne der følger med stokkeholderen anvendes.